


Previct[®] Drugs

Gebruiksaanwijzing

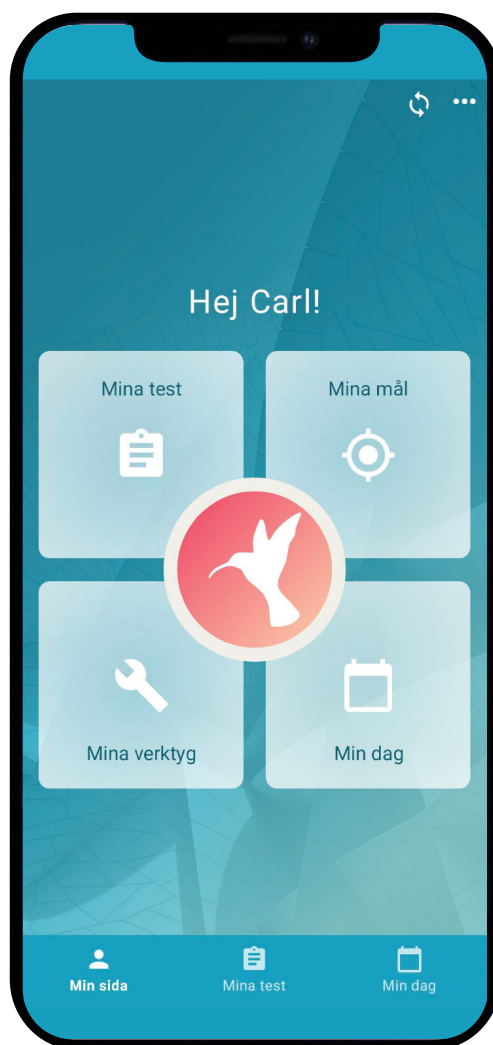

kontigo
care

Inhoudsopgave

Certificaat van conformiteit	3
Aansprakelijkheidsverklaring	3
Rapportage van ernstige incidenten	3
Bedoeld gebruik betreffende Previct Drugs	4
Bedoelde gebruikers	4
Bedoelde gebruiksomgeving	4
Indicatie	4
Contra-indicatie	4
Bedoelde patiëntengroep	4
Klinisch voordeel	5
Veiligheidsvoorschriften	5
Gebruikersinformatie	5
De volgende symbolen worden gebruikt in de productmarkering en in deze gebruiksaanwijzing	5
Productomschrijving	6
Technische/Analytische Prestaties	6
De App	7
Het Zorgportaal	7
Gezichtsherkenning	7
IT-beveiliging	7
Dataveiligheid en bescherming van persoonsgegevens	8
Voor de patiënt	8
Kom aan de slag met Previct Drugs	8
Het uitvoeren van een drugs test	8
Het uitvoeren van een Scheelkijkttest	9
Het uitvoeren van een Nystagmus-test	9
Het uitvoeren van een Contraction-test	9
Inchecken voor een vergadering	9
Jouw activiteiten	10
Afsluiten van Previct Drugs	10
Voor de Zorgverlener	10
Aan de slag met het Zorgportaal	10
Het opstellen van een zorgplan	11
Kalibreer de patiënt	11
Het volgen van een patiënt in de Zorgportaal	12
Patiëntenlijst	12
Patiëntenkaart	12
Behandelplan bewerken	12
Klantenservice	13



Kontigo Care

Bangårdsgatan 4C

753 20 Uppsala, Zweden

Bezoekadres: Bangårdsgatan 4A



Lewis de gebruiksaanwijzing voordat je begint met het gebruik van Previct Drugs.

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de huidige voorschriften die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente editie van de gebruiksaanwijzing is beschikbaar op Zorgportaal, in de App en op www.kontigocare.com

Certificaat van conformiteit



Previct Drugs is een medische software die CE-gemarkeerd is in overeenstemming met de EU-verordening 2017/745.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar in de Zorgportaal en in de app en kan op verzoek worden verkregen als afdruk van de klantenservice van Kontigo Care.

E-mail: support@kontigocare.com

Telefoon: +46 18 410 88 80

www.kontigocare.com

Aansprakelijkheidsverklaring

Previct Drugs is alleen bedoeld voor gebruik in overeenstemming met de door de fabrikant opgegeven beoogde gebruik en volgens de geldende gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door verkeerd gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de bedoelde persoon de tests te laten uitvoeren.

Resultaten van een drugstest mogen niet worden gebruikt voor juridische doeleinden.

Rapportage van ernstige incidenten

Alle ernstige incidenten veroorzaakt door of vermoedelijk veroorzaakt door Previct Drugs moeten altijd worden gemeld aan Kontigo Care en de betrokken autoriteit, die in Zweden het Medical Products Agency is.

Voor meer informatie zie <https://www.lakemedelsverket.se/sv>

Bedoeld gebruik betreffende Previct Drugs

Previct Drugs is een e-healthstelsel bedoeld voor gebruik bij de behandeling van middelenmisbruik om de behandeling van patiënten op afstand te ondersteunen en te monitoren. De Zorgportaal wordt gebruikt door zorgprofessionals om individuele behandelplannen te maken en om resultaten te verkrijgen met betrekking tot de behandelingsnaleving en de voortgang in drugsvrijheid van de patiënt.

De app wordt door patiënten gebruikt om drugstests uit te voeren met behulp van oogscantechnologie en om de gegevens te rapporteren die zijn toegewezen in het individuele behandelplan.

De drugstest is gebaseerd op de analyse van de reacties van het oog op de inname van drugs en geeft een indicatie van de volgende stoffen: opioïden, benzodiazepinen, centrale stimulerende middelen (bijv. amfetaminen en andere fenethylaminen). De test kan ook de inname van hoge doses cannabinoïden en alcohol aangeven.

Gegevens van de test en andere gerapporteerde gegevens worden verwerkt en geanalyseerd door de software om informatie te verstrekken over de drugsabstinentie, stemming, motivatie en behandelingsnaleving van de patiënt. De resultaten worden weergegeven in de Vårdportalen met als doel bij te dragen aan het onderzoek en de follow-up van de medische toestand en het herstel van de patiënt. De resultaten zijn indicatief en andere beschikbare klinische informatie moet ook worden overwogen.

Bedoelde gebruikers

Zorgprofessionals die werken aan de behandeling van patiënten met drugs-/middelenverslaving.

Patiënten die een behandeling ondergaan voor drugs-/middelenverslaving.

Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om te beoordelen en te beslissen of Previct Drugs geschikt is voor gebruik door de individuele patiënt.

Bedoelde Gebruiksomgeving

De Vårdportalen is een webportaal bedoeld voor gebruik op een computer met internettoegang door zorgverleners in een kantoorachtige omgeving.

De app is bedoeld voor gebruik door patiënten zelf in hun thuisomgeving, binnenshuis. De drugstests moeten worden uitgevoerd onder normale omgevingslichtomstandigheden.

Het gebruik van Previct Drugs vereist een individuele basislijn voor elke gebruiker. Deze basislijn wordt gecreëerd door drugstests uit te voeren gedurende 2-5 dagen onder nuchtere omstandigheden.

Indicatie

Gediagnosticeerde drugsverslaving waarbij drugsgebruik kan voorkomen tijdens de behandeling voor herstel.

Contra-indicatie

Previct Drugs mag niet worden gebruikt door patiënten met een voortdurende toestand van rode ogen (waarbij het oogwit rood is).

Previct Drugs mag niet worden gebruikt voor drugsdetectie voor andere medische doeleinden of juridische doeleinden.

Bedoelde patiëntengroep

18 jaar of ouder. Jongere personen kunnen Previct Drugs gebruiken als zorgverleners dit geschikt achten.

Klinisch voordeel

- Previct Drugs kan met een hoge waarschijnlijkheid aangeven of een patiënt drugs heeft gebruikt (opiaten, benzodiazepinen en fenethylaminen) in de afgelopen 1-5 uur, in een dosis die gebruikelijk is bij drugsverslaving.
- Previct Drugs maakt zelftoegediende en gecontroleerde drugstests op afstand mogelijk, waarbij personen die afwijken van hun drugsvrije basislijn kunnen worden geïdentificeerd.
- Previct Drugs maakt en versterkt positieve gedragsveranderingen mogelijk.
- Previct Drugs maakt gepersonaliseerde/zorg op maat mogelijk.
- Previct Drugs geeft uitgebreide informatie over de nuchterheid van patiënten en de naleving van de behandeling in realtime.
- Previct Drugs bevordert de behandeling.







Veiligheidsvoorschriften

- Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om ervoor te zorgen dat de patiënt geschikt is om Previct Drugs te gebruiken in zijn behandeling en dat hij in staat is om drugstests op een juiste manier uit te voeren.
- Factoren zoals vermoeidheid, stress, opwinding, medicatie en ziekten kunnen de oogbewegingen beïnvloeden en daardoor de capaciteit van het product om drugsgebruik correct en betrouwbaar aan te geven, beïnvloeden. Bij twijfel over de juistheid van het resultaat kan een andere drugstest worden uitgevoerd om te controleren of de persoon drugs heeft gebruikt of niet.
- Individuele eigenschappen van het oog of oogbewegingen kunnen de testresultaten beïnvloeden.
- Het resultaat van een drugstest is indicatief. Bij eventuele twijfel moet het resultaat worden geverifieerd met een andere drugstest, zoals een urine-, bloed- of speekseltest.
- Het licht van de flits waaraan het oog wordt blootgesteld tijdens drugstests kan als sterk en onaangenaam worden ervaren. Het uitvoeren van tests met Previct Drugs zoals bedoeld is niet schadelijk voor het oog.
- Het is niet toegestaan om iemand anders de test te laten uitvoeren, om het gezicht te verbergen of op een andere manier bewust de test te manipuleren. De drugstests moeten worden uitgevoerd volgens de instructies en begeleiding die worden gegeven in de app.

Gebruikersinformatie

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op www.kontigocare.com en kan kosteloos in papieren formaat worden besteld bij de klantenservice van Kontigo Care.

De volgende symbolen worden gebruikt in de productmarkering en in deze gebruiksaanwijzing

	Fabrikant		Lees de gebruiksaanwijzing / elektronische gebruiksaanwijzing
	Conformité Européenne.		Artikelnummer
	Medisch hulpmiddel		Uniek identificatienummer

Productomschrijving

Previct Drugs is een digitaal hulpmiddel voor zorgverleners en patiënten in de behandeling van drugsverslaving. Previct Drugs bestaat uit een webgebaseerd Zorgportaal voor de zorgverlener en een App voor installatie op de mobiele telefoon van de patiënt. De patiënt gebruikt de App in zijn thuisomgeving waar hij drugstests uitvoert en indien nodig taken, oefeningen uitvoert en zijn welzijn rapporteert. De zorgverlener kan op afstand de behandeling van de patiënt volgen door de resultaten van drugstests en andere gerapporteerde informatie zoals welzijn, uitgevoerde taken en oefeningen te bekijken in het Zorgportaal.

Het principe van drugstesten is gebaseerd op het feit dat het gebruik van stoffen zoals verschillende drugs de oogbewegingen beïnvloedt. Door de ogen te filmen met de camera van de mobiele telefoon en met de geavanceerde dataverwerking van de oogbewegingen van Previct Drugs, kan men met een hoge waarschijnlijkheid een indicatie krijgen of een persoon drugs heeft gebruikt of niet. Biologische reacties van de ogen variëren tussen individuen en Previct Drugs houdt hier rekening mee door een zogenaamde individuele kalibratie voor drugsabstinentie (baseline) op te stellen. De oogbewegingen van elke individuele persoon worden geanalyseerd en vervolgens vergeleken met de individuele baseline, en afwijkingen hiervan geven dan een indicatie of drugs zijn gebruikt of niet.

Technische/Analytische Prestaties

Drug	Detectielimiet *	Detectievenster **	AUC
Opioïden	20-30 ng/ml	5h	0.94
Amfetamine	50-100 ng/ml	5h	0,73
Benzodiazepinen	20-40 ng/ml	5h	0.89
Cannabis	20-100 ng/ml	1-3h	-

* Concentratie in het bloed

** Geschatte waarde. Afhankelijk van de hoeveelheid ingenomen drugs

- Een drugsvrije persoon wordt in 90-96% van de metingen groen
- Een rode meting betekent dat in 80% van de gevallen een drug aanwezig is
- Een gele meting betekent dat in 50% van de gevallen een drug aanwezig is




Indicatie van alcoholinname

Het is bekend dat alcohol, net als drugs, invloed heeft op oogbewegingen. Er is sterk wetenschappelijk bewijs dat alcoholinname met een bloedalcoholconcentratie van 0,8-1,0 ‰ kan worden gedetecteerd door nystagmus te meten. Omdat de drugstest in Previct Drugs onder andere nystagmus analyseert, is het waarschijnlijk dat de test ook alcoholinname kan aangeven met een bloedalcoholconcentratie van 0,8 ‰ of hoger, zij het met aanzienlijke individuele variatie.

De App

De App communiceert met en ontvangt informatie van het Zorgportaal voor drugstests en de activiteiten die zijn gekozen in het individuele behandelplan. De App wordt door de patiënt gebruikt om drugstests uit te voeren, welzijn en voltooide activiteiten te rapporteren. De App stuurt de gerapporteerde gegevens ter verwerking, die vervolgens worden weergegeven in het Zorgportaal. Als de internetverbinding wordt onderbroken of ontbreekt, worden gegevens tijdelijk opgeslagen in de App totdat er weer verbinding is.

De App toont ook het resultaat van elke uitgevoerde drugstest in de vorm van symbolen:

-  Toont niet drugs aan
-  Wijkt af van normaal
-  Toont drugs aan

De App is beschikbaar om te downloaden in de Google Play Store of de App Store en wordt geïnstalleerd op de mobiele telefoon van de patiënt. Wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is, ontvangt u een melding in de app en kunt u ervoor kiezen om de app bij te werken. Kontigo Care raadt aan om altijd te updaten naar de nieuwste versie voor de beste functionaliteit.

Toegang tot de App wordt verkregen met een activeringscode die beschikbaar is in het Zorgportaal, die uniek is voor elke patiënt, samen met een persoonlijke pincode.

De App kan worden gebruikt met Android 10.0 of hoger en iOS 16.0 of hoger. De mobiele telefoon moet toegang hebben tot de Google Play Store of de App Store en een internetverbinding hebben.

Het Zorgportaal

Het Zorgportaal is een webgebaseerde portal die door zorgverleners wordt gebruikt om individuele behandelplannen te maken en de resultaten van de drugstests van patiënten, evenals oefeningen en taken, te bekijken. De resultaten worden gepresenteerd in verschillende weergaven waarin men zowel uitgevoerde tests, niet-uitgevoerde tests en andere gerapporteerde gegevens in realtime en in de loop van de tijd kan zien.

Toegang tot het Zorgportaal wordt verleend door Kontigo Care. De individuele behandelplannen, zoals geplande drugstests en gekozen activiteiten, worden gecommuniceerd naar de patiënt via de App. Het Zorgportaal vereist een internetverbinding en wordt het best gebruikt met webbrowsers zoals Edge of Chrome.

Gezichtsherkenning

Om ervoor te zorgen dat de juiste persoon de drugstest uitvoert, wordt het gezicht tijdens de drugstest gefilmd. De video wordt naar het Zorgportaal gestuurd, waar het de verantwoordelijkheid van de zorgverlener is om te controleren of de juiste persoon de test heeft uitgevoerd. De afbeeldingen worden alleen bewaard zolang als nodig is voor identificatie en worden daarna verwijderd.

IT-beveiliging

Toegang tot het Zorgportaal vereist tweestapsverificatie.

Toegang tot de App vereist een activeringscode en een persoonlijke pincode.

Alle gegevens en communicatie zijn versleuteld. Gegevens worden opgeslagen in een cloud-database die wordt beheerd door een goedgekeurde EU-leverancier.

Dataveiligheid en bescherming van persoonsgegevens

De informatie die wordt opgeslagen of verwerkt door Kontigo Care in het Zorgportaal bevat persoonsgegevens waarvoor de zorgverlener verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Kontigo Care wordt dus beschouwd als de verwerker van persoonsgegevens namens de zorgverlener. Kontigo Care verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan wat vereist is voor het beoogde gebruik van Previct Drugs.

Kontigo Care houdt zich aan de wetten en neemt maatregelen om persoonsgegevens en gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, vernietiging en wijziging.

Lees meer over alles wat belangrijk voor u is om te weten over privacy en beveiliging bij het gebruik van Kontigo Care-producten op <https://kontigocare.com/privacy-policy/>.

Voor de patiënt

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u Previct Drugs gaat gebruiken.

Neem kennis van de veiligheidsinformatie.

De contactinformatie voor Kontigo Care vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.







Kom aan de slag met Previct Drugs

Je zorgverlener introduceert Previct Drugs aan jou en activeert het gebruik ervan.

Je gebruikt een activeringscode om toegang te krijgen tot de App en logt vervolgens in met een persoonlijke pincode of biometrie (vingerafdruk of gezichtsherkenning) als je dit hebt ingesteld op je mobiele telefoon.

Geef altijd aan je zorgverlener door als je van tevoren weet dat je niet in staat bent om drugstests of andere taken uit te voeren, bijvoorbeeld als je op reis bent en geen internetverbinding hebt.

Het uitvoeren van een drugstest

- a) Wanneer er een geplande test beschikbaar is, ontvang je een melding in de App en een geluidssignaal op je telefoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opmerken wanneer een drugstest moet worden uitgevoerd.
- b) Start de App op je mobiele telefoon, ofwel vanuit de melding of vanaf de snelkoppeling op het startscherm van je telefoon. Log in met je pincode of biometrie (indien ingesteld als inlogmethode).
- c) De drugstest bestaat uit drie deeltests: Scheelkijkttest (zie meer onder 'Het uitvoeren van een Scheelkijkttest'), Nystagmus-test (zie meer onder 'Het uitvoeren van een Nystagmus-test') en Contractietest (zie meer onder 'Het uitvoeren van een Contractietest').
- d) Druk op "Start test".
- e) Volg de instructies in de App.
- f) Na het uitvoeren van een deeltest wordt er een analyse uitgevoerd in de App om te bepalen of de uitvoering van de test geslaagd was of niet. Je hebt twee pogingen per deeltest om een geslaagd resultaat te behalen.
- g) Als alle drie de testen zijn uitgevoerd, wordt de test als geheel geanalyseerd en wordt er een resultaat weergegeven in de App.
- h) Als de test geen drugs aantoont, is de test voltooid en wordt het symbool  weergegeven.
- i) Als de test afwijkt van normaal, wordt het symbool  weergegeven. Als de test drugs aantoont, wordt het symbool  weergegeven. Je wordt gevraagd om een tweede test uit te voeren om een fout-positief resultaat uit te sluiten. Je hebt ook de mogelijkheid om op dit punt af te zien van een tweede test en in plaats daarvan het druggebruik te bevestigen. Daarna is de test voltooid.
- j) Als ook de tweede test afwijkt van normaal, wordt het symbool  weergegeven. Als de tweede test drugs aantoont, wordt het symbool  weergegeven.
- k) Als de tweede test geen drugs aantoont, zijn de resultaten negatief en wordt het symbool  weergegeven. Beëindig door op OK te klikken.

Het uitvoeren van een Scheelkijkttest

De app begeleidt je door de test. Volg de instructies van de app.

- Houd je ogen zo breed mogelijk open gedurende de hele test.
- Als de stem aangeeft, kruis dan je ogen. Kijk naar een punt tussen je ogen, vermijd het kijken naar de puntje van je neus. Blijf je ogen kruisen tot de stem je vertelt om te stoppen.
- Houd de positie vast tot de app aangeeft dat de test is voltooid.
- Een analyse begint wanneer de test is voltooid.
- De app informeert je of de uitvoering van de test is goedgekeurd.

Als je het moeilijk vindt om je ogen te kruisen, kun je je wijsvinger tegen je neus aan houden zodat de top van je vinger ter hoogte van je ogen is of hoger, en kijk dan naar de top van je vinger.

Het uitvoeren van een Nystagmus-test

De app begeleidt je door de test. Volg de instructies van de app.

- Houd je ogen zo breed mogelijk open gedurende de hele test.
- Als de stem het aangeeft, houd je je hoofd recht en stil, kijk in de camera. Houd die positie vast
- Kijk zo ver mogelijk naar rechts of naar links wanneer de app daarom vraagt. Het hoofd moet te allen tijde stil blijven, beweeg alleen je ogen.
- Houd de positie vast tot de app aangeeft dat de test is voltooid.
- Een analyse begint wanneer de test is voltooid.
- De app informeert je of de uitvoering van de test is goedgekeurd.

Het uitvoeren van een Contractietest

De app begeleidt je door de test. Volg de instructies van de app.

- Houd je ogen zo breed mogelijk open gedurende de hele test.
- Als de stem het aangeeft, draai je je telefoon zodat de achterkant van de camera naar jou gericht is. Probeer het scherm niet aan te raken terwijl je de telefoon draait.
- De app zal je begeleiden zodat je gezicht zich op de juiste positie bevindt. Kijk naar de camera. De ingebouwde zaklamp van de mobiele telefoon wordt ingeschakeld. Houd je ogen open en kijk in de camera terwijl de zaklamp aan is.
- Je krijgt instructies om de telefoon terug te draaien wanneer de test is voltooid.
- Na de oogmeting begint een analyse van je meting.
- De app informeert je of de uitvoering van de test is goedgekeurd.

Inchecken voor een vergadering

- a) Ga op de geplande tijd naar de locatie van de vergadering.
- b) Start de app en log in met je persoonlijke pincode (of biometrie).
- c) Ga naar de pagina met een lijst van vergaderingen in de buurt waar je kunt inchecken. Groen geeft aan dat de vergadering open is en dat je op de juiste plaats bent. Oranje betekent dat de vergadering open is, maar dat je op de verkeerde plaats bent. Rood betekent dat de vergadering gesloten is.
- d) Selecteer de vergadering die je wilt bijwonen en druk op "Inchecken".
- e) Je bezoek is nu geregistreerd en wordt naar de Zorgportaal gestuurd waar je zorgverlener het kan zien.

Jouw activiteiten

Jij en je zorgverlener stellen je behandelplan op met drugstests, vragenlijsten, andere taken en doelen, die vervolgens via de app naar jou worden gecommuniceerd. Je gebruikt de app en je mobiele telefoon om drugstests uit te voeren en je gegevens te rapporteren. Wanneer je de app opent en naar de pagina Mijn tests gaat, kun je een drugstest starten en uitvoeren. Je kunt je eigen voortgang volgen, zoals het aantal dagen zonder drugs, en je behaalde mijlpalen bekijken onder Mijn doelen, waar je Voortgang en Beloningen vindt.

Als je de app opent en naar de pagina Mijn dag gaat, kun je je gegevens en vragenlijsten zien.

- Druk op een taak om deze uit te voeren en markeer deze als voltooid.
- Druk op duim omhoog om een taak leuk te vinden en duim omlaag om een taak niet leuk te vinden.
- Veeg naar links over een taak om de uitvoering ongedaan te maken.
- Klik op het plusteken rechtsboven om eigen taken toe te voegen.


Onder Mijn Hulpmiddelen vind je verschillende functies, zoals motivatiebeelden en tekst, berichten, dagboek, emotieknop en hulpknop. Jouw zorgverlener zal deze met jou doornemen. Om ze te gebruiken, druk je op de desbetreffende knop en beantwoord je de vraag.


Afsluiten van Previct Drugs

De zorgverlener beëindigt de patiënt in het Zorgportaal door naar 'Patiënt bewerken' te gaan en vervolgens 'Patiënt afsluiten' te selecteren wanneer de behandelingsperiode voorbij is. Nadat de patiënt in het Zorgportaal is afgesloten, is het niet meer mogelijk om in te loggen op de App.

Voor de Zorgverlener

Aan de slag met het Zorgportaal

In het menu onder Help vind je de gebruikershandleiding, contactgegevens van Kontigo Care en de klantenservice, en andere richtlijnen. Het Zorgportaal bevat geïntegreerde informatie die je helpt bij de verschillende stappen. Je vindt deze informatie door te klikken op het symbool .

In het Zorgportaal worden symbolen gebruikt. De betekenis van deze symbolen vind je onder Help of door te klikken op het symbool  waar je je bevindt, en in sommige gevallen ook door met de muis over het symbool te bewegen.

Het opstellen van een zorgplan

In de patiëntenweergave, klik op "Voeg patiënt toe".

- a) Klik op "Persoonsgegevens" en vul de gewenste informatie in.
- b) Klik op "Doelen" en vul de gewenste informatie in.
- c) Onder het menu "Licentie en pakket" kiest u de gewenste licentie voor de patiënt en koppelt u deze zo aan de patiënt.
- d) Onder het menu "Veiligheid" voert u de gewenste viercijferige code in voor de app van de patiënt.
- e) Onder "Zorgverleners" selecteert u wie toegang heeft tot de patiëntinformatie en de mate van autorisatie, en wie op de hoogte zal worden gebracht als de patiënt afwijkt van het behandelplan.
- f) Klik op "Drugs" om drugstests in te schakelen. Kies vervolgens de instellingen voor de nuchterheidsgrens, het aantal drugstests en het tijdsbestek, evenals het gewenste bericht na een voltooide test.
- g) Klik op het menu "Tools" om verschillende Cognitieve Gedragstherapie (KBT) tools voor de patiënt in of uit te schakelen. Standaard staan de Help-knop, de Emotie-knop, het Dagboek en het Gevoel ingeschakeld, terwijl Motivatie en Mijn Eerlijke Dag zijn uitgeschakeld en actief moeten worden ingeschakeld indien gewenst.
- h) Nadat u uw instellingen heeft gemaakt, kiest u: "Volgende". Als drugstests zijn ingeschakeld, kunt u hier instellen hoeveel tests de patiënt per dag moet uitvoeren, evenals tussen welke tijden. U kunt ook een schema op maat maken voor drugstests, waarbij het aantal tests en de frequentie van tests in verschillende perioden kunnen variëren of tests voor een bepaalde dag kunnen worden gewijzigd. Bij het aanpassen van een schema krijgt u een voorbeeld te zien van hoe het nieuwe schema eruit zal zien om fouten te voorkomen.
- i) Klik vervolgens op "Volgende". Hier heeft u de mogelijkheid om taken voor de patiënt toe te voegen, indien gewenst, kies "Toevoegen".
- j) Klik daarna op "Volgende". Hier kunt u vragenlijsten toevoegen, indien gewenst.
- k) Sluit af door op "Voltooien" te drukken en uw behandelplan voor de patiënt zal starten.

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in het zorgplan, ga dan naar "Patiënt bewerken" en pas aan wat je wilt.

Kalibreer de patiënt

Om de gevoeligheid van de drugstest het hoogst moet zijn en individuele variaties moeten worden verminderd, moet je ervoor kiezen om elke gebruiker te kalibreren bij het opstarten van Preact Drugs.

Activeer of deactiveer de mogelijkheid voor de patiënt om een kalibratie uit te voeren in de module Drugs wanneer je je patiënt aanmaakt of voor een patiënt tijdens de behandeling bij Bewerk Patiënt.

Bij het activeren van een kalibratie zal Preact de binnenkomende metingen bewaken en beoordelen of ze kunnen dienen als basis voor een kalibratie.

Tijdens de kalibratie kan de zorgverlener inspecteren hoe de kalibratie vordert door in het kalibratiescherm te klikken op 'Inspecteren'.

Preact zal informeren wanneer de kalibratie de vereiste criteria heeft bereikt en de zorgverlener moet dan de kalibratie goedkeuren. Na de goedkeuring van de zorgverlener is de kalibratie voltooid.

Een lopende kalibratie kan door de zorgverlener worden afgekeurd. Er wordt dan een nieuwe kalibratie gestart.

Totdat er een goedgekeurde kalibratie is, zal de gebruiker Preact Drugs gebruiken in een ongekalibreerde modus.





Meer informatie over de kalibratie is te vinden in de zorgportal onder 'Help' -> 'Preact Drugs' -> 'Kalibratie'.

Het volgen van een patiënt in de Zorgportaal

Patiëntenlijst

Patiënten worden gesorteerd op Nuchterheidsindex, waarbij degenen met de laagste Nuchterheidsindex bovenaan staan. De Nuchterheidsindex geeft aan hoe goed de patiënt zich aan het behandelplan houdt en wordt weergegeven als een cijfer tussen 0 en 100, waarbij een persoon met een Nuchterheidsindex van 100 alle nuchterheidstests heeft uitgevoerd en elke keer onder de nuchterheidsgrens is gebleven. Hoe meer afwijkingen de patiënt heeft, hoe lager de Nuchterheidsindex.

Nuchterheidsindex wordt ook gesorteerd op kleur:

-  Nuchterheidsindex 80 - 100
-  Nuchterheidsindex 60 - 79
-  Nuchterheidsindex 0 - 59
-  Na de cijfers voor het nuchterheidsindex verschijnt een pijl die aangeeft of het huidige getal hoger of lager is dan voorheen.

Onder Status kunnen er meldingen zijn die aangeven dat er iets moet worden opgemerkt of aangepakt.

 De patiënt heeft gegevens die niet naar Previct zijn verzonden.

Patiëntenkaart





Klik op de patiënt in de patiëntenlijst, dan kom je bij een overzicht van de patiënt. Hier wordt een algemeen beeld van de patiënt getoond.

Zorgplan bewerken

Onder "Behandlingsplan bewerken" kunt u wijzigingen aanbrengen in het behandelplan van de patiënt. U kunt ook berichten naar de patiënt sturen, fotoidentificatie bekijken, contactpersonen toevoegen en actuele informatie over de patiënt bekijken.

Als u op "Kalender" in het bovenste menu klikt, worden alle activiteiten van de patiënt per dag van de afgelopen maand weergegeven. Als u op de informatie voor een bepaalde dag klikt, worden aanvullende details over de uitgevoerde taak of de betekenis van het symbool weergegeven. Met de pijlen naast de naam van de maand kunt u vooruit of achteruit in de tijd navigeren.

Symbolen die worden weergegeven in de kalender met betrekking tot drugstests:

-  Toont niet drugs aan
-  Gemiste
-  Afwijkt van normaal
-  Toont drugs aan

Als je op Grafiek klikt in het bovenste menu, worden de resultaten van de patiënt in de loop van de tijd weergegeven.

Onder Taken en Vragenlijsten in de menubalk kun je vragenlijsten en taken toevoegen en de resultaten daarvan bekijken.

Klantenservice

Voor vragen over uw behandeling, neem altijd contact op met uw zorgverlener.

Bij problemen of vragen over Previct Drugs, neem contact op met de klantenservice van Kontigo Care.

Contact:

support@kontigocare.com

Telefoon: +46 18 410 88 80

Geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur

www.kontigocare.com

Alle rechten voorbehouden © 2025 Kontigo Care AB